




· photizo[®]
Vetcare

Besser leben mit Licht

Photizo[®] Vetcare
Gebrauchsanweisung

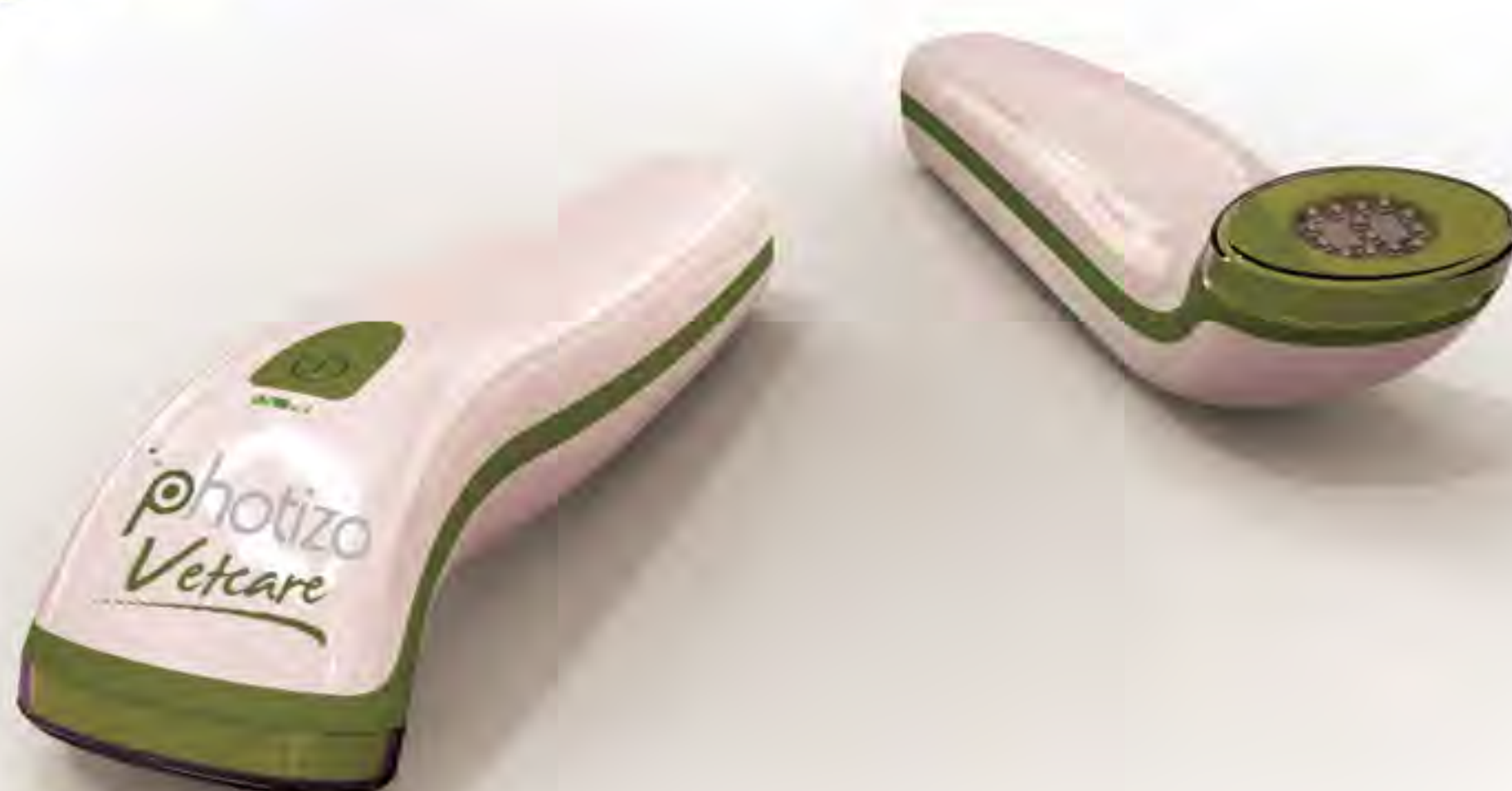

Weitere Geräte der Photizo® Home Serie:



® Photizo® Pain Relief lindern Schmerzen und reduziert Schwellungen und Entzündungen, insbesondere bei Patienten mit Arthritis - es sorgt auch für eine schnellere Erholung der Gelenke nach Verletzungen. Es eignet sich für die Behandlung von Schmerzen und Entzündungen in Verbindung mit Erkrankungen der Gelenke wie etwa alle Arten von Arthritis und Gicht. Photizo Pain Relief reduziert Muskelkrämpfe und vergrößert den Durchmesser von Blut- und Lymphgefäßen, so dass der Abtransport von Abfallstoffen und die Zufuhr von Sauerstoff und Nährstoffen in dem behandeltem Bereich verbessert wird



® Photizo® Skin Care bietet eine unterstützende, nicht-invasive Behandlungsmethode bei kosmetischen Behandlungen und Anti-Aging, Akne und Pickeln, Wundheilung (akute und chronische Wunden) sowie bei sonstigen Hautschäden, z.B. Kratzern, Schnitten, Blasen, leichten Verbrennungen und Sonnenbrand, Schuppenflechte, Ekzemen und anderen entzündlichen auterkrankungen sowie bei Fieberausschlag.



® Photizo® Sinus bietet eine begleitende, nicht-invasive Behandlungsmethode zur Behandlung von Sinusitis, Ohrenschmerzen, Halsschmerzen/Kehlkopfentzündung, Entzündungen der Stimmbänder, Rhinitis/Rinopathie, Mandelentzündung, Zahnschmerzen und verschiedenen anderen Erkrankungen.



® Photizo® Sport lindert Schmerzen, indem es die Zellteilung stimuliert und senkt Schwellungen und Entzündungen. Photizo Sport wirkt bei der Behandlung von Schmerzen und Entzündungen, die in Verbindung mit Verletzungen durch Überbeanspruchung auftreten wie das Läuferknie, Schienbeinschmerzen, Tennis- und Golfarm etc. Photizo Sport stimuliert die Heilung, lindert Schmerzen, Schwellungen und Entzündungen, hilft bei Muskelkrämpfen und vergrößert den Durchmesser der Blut- und Lymphgefäße, so dass der Abtransport von Abfallstoffen und die Zufuhr von Sauerstoff und Nährstoffen verbessert wird

Besser leben mit Licht

Inhaltsverzeichnis:

Einführung	3
Was kann ich mit Photizo® Vetcare behandeln?	4
Vorsichtsmaßnahmen.....	5
Vorbereitung der Behandlung	6
Wie wende ich die Behandlung an?.....	7
Wie hilft Photizo® Vetcare dabei Schmerzen zu lindern, zu heilen und das Immunsystem zu stimulieren?.....	7
Erkrankungen und Behandlung	9
- Probleme mit Weichteilen: Muskeln, Sehnen & Bändern	10
- Wunden, Abszesse, Prellungen, akrale Leckdermatitis, Prellungen, etc.	10
- Gelenkprobleme, Prellungen, Stressfrakturen und Knorpelverletzungen	11
- Prellungen des tiefen Gewebes und Hämatome	11
- Post-operative Behandlungen	11
- Anwendungsmöglichkeiten für ausgebildete Tierärzte	11
Der Gebrauch des Photizo® Vetcare	12
Fehlerbehebung	13
Technische Daten	13
Standardzubehör	13
Kontakt	14



Vielen Dank und herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf!

Sie sind jetzt stolzer Besitzer einer Photizo Vetcare. Sie können davon ausgehen, dass Ihr Photizo Vetcare jahrelang reibungslos, einwandfrei und optimal funktioniert. Wir haben viel Aufwand, Ideen, Engagement und Nachforschungen investiert, um Ihnen dieses großartige, hochwertige Gerät bieten zu können.

Wir hoffen, dass Ihnen das Gerät dabei helfen wird Ihr Tier zu heilen, seine Schmerzen zu lindern und seine allgemeine Gesundheit zu steigern, wie es schon bei vielen anderen geholfen hat. Wir sind stolz darauf, Sie als neuen Partner auf dem Weg zu mehr Wellness an unserer Seite zu haben.

Bitte besuchen Sie unsere Webseite für weitere Informationen:

www.photizo.net

Einführung

Seit Ewigkeiten ist Sonnenlicht (als die früheste Form der Lichtbehandlung) dafür bekannt, sowohl heilende als auch wohltuende Wirkungen zu haben. Licht ist Energie, und Energie trägt Leben - es kann nicht zerstört werden, aber es kann in andere Formen umgewandelt werden.

Photizo® Vetcare ist ein LED Gerät, das rotes und infrarotes Licht ausstrahlt und damit in die Haut eindringt und so die Energieproduktion und andere Stoffwechselprozesse in ausgewählten Bereichen stimuliert. Infrarotlicht gehört zu den wenigen physischen Therapien, die eine heilende verletzte Zellen können durch das Licht tatsächlich regeneriert werden.

Light Emitting Diodes (LEDs) sind nicht stark genug, um Gewebe zu schädigen, aber sie liefern genug Energie um die natürliche Selbstheilung zu forcieren und Schmerzen zu lindern. Da ihre Ausgangsleistung so optimiert wurde, dass sie besonders wirksam sind, liefern LEDs die gleichen heilenden Licht-Wellenlängen wie Laser, allerdings auf eine viel sanftere Weise und ohne das Risiko, aus Versehen die Augen zu schädigen, das bei Laser existiert.

LEDs sind sehr gut dafür geeignet Licht mit spezifischen Wellenlängen zu erzeugen, und mehrere Studien haben belegt, dass das Licht an sich in bestimmten Wellenlängen therapeutischer Natur ist. Jedes biologische System hat ein eignes Absorptionsspektrum, das festlegt welche Wellenlängen an Strahlung absorbiert werden, um einen therapeutischen Effekt zu erzielen. Der sichtbare rote und der unsichtbare infrarote Bereich des Spektrums haben sich als hoch absorbierend erwiesen. Sie haben eine einzigartige therapeutische Wirkungen auf lebendiges Gewebe.

Außerdem kann sich der Lichtstrahl bei LEDs ausbreiten statt auf einen winzigen Punkt ausgerichtet zu sein. Der große Winkel bei der Verbreitung der LED sorgt für eine einfachere Anwendung, weil die Lichtemission dabei mehr Oberfläche erreichen kann, und das führt zu schnelleren Behandlungszeiten für bestimmte Bereiche als Laser.

Photizo® Vetcare bietet mit einem Handgriff vorprogrammierte, wirksame Dosen von nahem Infrarot-LED-Licht für die Behandlung vieler schmerzhafter Zustände und Entzündungen. Photizo Vetcare stellt sicher, dass die wirkungsvolle Menge an Wattsekunden/Dosen für verschiedene beschriebene Erkrankungen einfach und präzise geliefert wird.

Was kann ich mit Photizo® Vetcare behandeln?

Photizo® Vetcare wurde für Behandlung folgender Tiere konzipiert:

- Haustiere - Hunde und Katzen
- Nutztiere - Rinder, Schafe, Ziegen, Schweine, Böcke etc.
- Pferde

Photizo® Vetcare lindert Schmerzen, fördert die Zellregeneration und Heilung, reduziert Schwellungen und Entzündungen und stimuliert das Immunsystem bei akuten traumatischen Erkrankungen. Photizo® Vetcare wirkt bei chronischen Schmerzen und Entzündungen, die in Verbindung mit arthritischen Erkrankungen und Verletzungen wegen Überbelastung auftreten. Photizo® Vetcare fördert die Heilung, reduziert Schmerzen, Schwellungen, Entzündungen und Muskelkrämpfe. Es steigert den Durchmesser der Blut- und Lymphgefäße, so dass der Abtransport von Abfallstoffen und die Zufuhr von Sauerstoff und Nährstoffen verbessert wird und sorgt für eine optimale Wirkstoffkonzentration in den Bereichen, die behandelt werden.

Photizo® Vetcare hat sich bei der Behandlung folgender Bereiche als wirksam erwiesen:

- ***Hauterkrankungen:***
Wunden, Fleischwunden, Nekrose nach Hyaloma-Zeckenbissen, Flecken, Abszesse, wund gescheuerte Stellen, Haronema, Proud Flesh, akrale Leckdermatitis, Prellungen, Otitis externa, Pustelausschlag, Pododermatitis, Hautallergien, Ekzeme, etc.
- ***Probleme des Bewegungsapparates:***
Arthritis, Tendinitis, Myositis, Sehnen/Bänder, Verstauchungen, Prellungen, Brüche, Schmerzen in Rücken und Nacken, Schienen, Verletzungen durch Überbelastung, Synovitis, Ödeme, Hämatome, Muskelverletzungen und -krämpfe, lokale Muskelverhärtungen (Triggerpunkte), Serome, Mastitis, etc.
- ***Nach Operationen:***
Bei allen chirurgisch behandelten Bereichen inklusive Hauttransplantationen
- ***Sonstige Bereiche:***
Korneale Geschwüre, Viruszustände, Herpeserkrankungen, Sinusitis, retro-obikulares Trauma

Bitte lesen Sie die folgenden Richtlinien für die Behandlung und die Betriebsanleitung, bevor Sie Photizo® Vetcare anwenden, um eine optimale und richtige Verwendung sicher zu stellen.

Vorsichtsmaßnahmen

Bitte beachten Sie, dass Photizo® Vetcare als zusätzliche Behandlungsmethode gedacht und in Verbindung mit einer medizinischen Behandlung eingesetzt werden soll. Die Hersteller und Vertreiber von Photizo® Vetcare empfehlen grundsätzlich, das Gerät unter Aufsicht eines Klinikiers zu nutzen. Photizo® Vetcare ist nicht als Ersatz für normale medizinische Verfahren, ob Medikamente und/oder Behandlungen gedacht. Die Hersteller und Vertreiber von Photizo® Vetcare können in keiner Weise zur Verantwortung gezogen werden, wenn es zu Schäden, Verlusten oder Verletzungen kommt, weil das Gerät außerhalb der empfohlenen Richtlinien und des Behandlungsprotokolls verwendet wurde. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass nicht alle Erkrankungen in gleicher Weise von der Lichttherapie profitieren. Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf Photizo® Vetcare, setzen Sie nicht die Behandlung mit anderen Medikamenten, Antibiotika oder antimykotischen Mitteln aus.

- **Krebs:** Die Lichttherapie kann Krebs weder heilen noch verursachen. Nutzen Sie die Lichttherapie nicht bei Krebs oder wenn der Verdacht auf Krebsmasse besteht. Die Lichttherapie kann keinen Krebs verursachen - bislang gibt es in der medizinischen oder wissenschaftlichen Literatur keinen Hinweis darauf, dass LED-basierte Geräte für die Lichttherapie Veränderungen bewirken. Bei dem Licht, das Photizo® Vetcare produziert, handelt es sich um Infrarot oder nahes Infrarot, das ist nicht-ionisierendes Licht und befindet sich am anderen Ende des Lichtspektrums wie das schädliche ultraviolette Licht (UV). Photizo® Vetcare kann aber bei der Behandlung von vielen Nebenwirkungen, die bei einer Krebsbehandlung auftauchen - wie zum Beispiel Mukositis, einer schmerzhaften Nebenwirkung der Strahlentherapie - hilfreich sein.
- **Schwangerschaft:** Eine Photonen-Therapie ist eine sichere und wirksame Behandlung während Schwangerschaften. Die Wirkung einer Therapie mit rotem oder infrarotem Licht während Schwangerschaften wurde noch nicht untersucht. Auch wenn der Fötus nicht negativ durch Licht beeinflusst werden kann, empfehlen wir, Photizo Vetcare nicht für Bereiche zu verwenden, die sich direkt über dem Fötus befinden.
- **Epilepsie:** Einige Studien legen nahe, dass gepulstes sichtbares Licht von einer Frequenz zwischen 5-10 Hz zu Anfällen führen kann. Photizo® Vetcare operiert nicht in dem Bereich zwischen 5-10 Hz, trotzdem sollte man, wenn man unter Krampfanfällen leidet, möglichst nicht direkt in den Lichtkegel schauen, der von der Sonde ausgestrahlt wird. Das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme.
- **Vermeiden Sie übermäßige Behandlungen:** Übermäßige Behandlungen führen nicht zu schnellerer Heilung oder Schmerzlinderung. Der übermäßige tägliche Gebrauch kann zu einer Überstimulation führen und damit die Heilung verzögern (hemmender Effekt).

- Bei einigen Tieren mit chronischen Erkrankungen kann es bei der ersten Behandlung mit Lichttherapie zu leichtem Unwohlsein kommen. Das liegt an der Reaktion des Körpers, wenn er mit dem Heilungsprozess beginnt. Es ist kein Grund zur Besorgnis, und die Behandlung sollte fortgesetzt werden.
- Man braucht keinen Schutz für die Augen, aber da das Licht sehr hell ist, sollte man nicht direkt in das ausgestrahlte Licht schauen.
- Die Linse des Photizo Geräts wärmt sich bei wiederholten Anwendungszyklen durch die Energie des ausgestrahlten Lichts auf. Wenn die Linse so heiß wird, dass man sie nicht mehr anfassen kann, unterbrechen Sie die Behandlung für ein paar Minuten, damit sich die Linse abkühlen kann, bevor Sie wieder mit der Behandlung fortfahren.
- Bitte unterbrechen Sie nicht die Einnahme von Medikamenten und von dem, was Ihr Tierarzt verschrieben hat. Die Behandlung mit Photizo Vetcare sollte begleitend erfolgen, sie hilft und fördert den Heilungsprozess, lindert Schmerzen und Muskelkrämpfe und stimuliert das Immunsystem.

Vorbereitung der Behandlung

Säuberung, Wartung und Aufbewahrung

Photizo® Vetcare sollte vor und nach jeder Nutzung mit Hilfe eines sauberen Tuchs und Wundbenzin gereinigt werden oder mit Alkohol, soweit notwendig. Photizo Vetcare sollte immer an einem sicheren, trockenen Ort aufbewahrt werden, am Besten in der Tragetasche, in der es geliefert wurde. Es sollte mit Sorgfalt benutzt werden und nicht im Wasser angewendet oder unter Wasser getaucht werden.

Photizo Vetcare verfügt über ein umfassendes Produkt-Back-up, Garantie und Wartungsmöglichkeiten. Die Photizo LED Diode kann bis zu 50.000 Stunden ohne merkbare Einbuße Leistung erbringen.

Reinigen Sie die Haut, bevor Sie mit der Behandlung beginnen, weil Schmutz das Licht blockieren könnte. Es ist ratsam, die betroffene Stelle zu rasieren, weil Pelz auch das Durchdringen des Lichts stören kann.

Sie können die Sonde vor Schmutz schützen, indem Sie sie mit transparentem Plastik abdecken.

Wie wende ich die Behandlung an?

- Setzen Sie die Sonde so an, dass sie die Haut direkt berührt, an dem Bereich, der behandelt werden soll, und drücken Sie den POWER-Schalter. Das Gerät piept zweimal.
- Halten Sie die Sonde in der Position bis das Gerät wieder piept. Es schaltet sich automatisch aus. Das bedeutet eine Dosis. Wenn doppelte oder dreifache Dosen gebraucht werden (siehe nachfolgende Tabelle), halten Sie die Sonde in der Stellung und wiederholen Sie die Dosis wie vorgegeben.
- Bewegen Sie die Sonde an die nächste Stelle. Drücken Sie wieder den POWER-Schalter.
- Wiederholen Sie den Vorgang, bis Sie den gesamten betroffenen Bereich abgedeckt haben.
- Die Linse des Photizo Gerät wird bei wiederholten Anwendungszyklen warm, wegen der Energie des Lichts, das sie ausstrahlt. Wenn die Linse so heiß wird, dass man sie nicht mehr anfassen kann, unterbrechen Sie die Behandlung für ein paar Minuten, damit sich die Linse abkühlen kann, bevor Sie mit der Behandlung fortfahren.

Wie hilft Photizo Vetcare dabei, Schmerzen zu lindern, zu heilen und das Immunsystem zu stimulieren?

Akute Verletzungen:

Photizo® Vetcare stimuliert die Produktion von Energie (ATP) in den Zellen um bis zu 250 mal und sorgt so dafür, dass die Zellen optimal arbeiten. Außerdem stimuliert und reguliert es die Synthese aus DNA und RNA - die Codes in der Zellen - so dass sie dem richtigem Heilungsprozess folgen und reguliert das Narbengewebe/die Entstehung von Proud Flesh. Dadurch wird der Heilungsprozess um 30 bis 40 Prozent beschleunigt und die Wahrscheinlichkeit, dass es zur Bildung von exzessivem Narbengewebe und Komplikationen kommt, wird reduziert.

Photizo® Vetcare fördert die Ausscheidung von Endorphin und Serotonin. Das sind die körpereigenen „Medikamente“ gegen Schmerzen und für Entspannung. Photizo Vetcare reduziert den Entzündungsprozess, der durch Beschädigung, Verletzung oder Überbeanspruchung verursacht wird sowie Muskelkrämpfe und Triggerpunkte. Photizo® Vetcare trägt dazu bei, dass Schwellungen zurückgehen, indem es den Durchmesser der Blut- und Lymphgefäße erweitert. So können Abfallstoffe aus den verletzten oder entzündeten Bereichen abtransportiert werden. Das reduziert den Druck und die Reizung an den Nervenenden, die zusätzliche Schmerzen verursachen, und sorgt dafür, dass mehr Blut in diesen Bereich fließt, um sicher zu stellen, dass das Gewebe mehr Sauerstoff und mehr Nährstoffe aufnehmen kann.

Es hilft auch dabei exzessive Wundflüssigkeit zu reduzieren und damit das Risiko sekundärer bakterieller Infektionen zu senken. Die gesteigerte Durchblutung in den Bereichen sorgt dafür, dass topische und systemische Medikamente in höheren Konzentrationen an die betroffenen Stellen gebracht werden können. Photizo® Vetcare stimuliert die Immunzellen, so dass sie auf Infektionen reagieren. Photizo® Vetcare fördert das optimale Arbeiten der Zellen (Haut, Knochen, Nerven, Kapseln, Knorpel und Muskeln) um gesundes Gewebe zu erhalten. Das kann dabei helfen, vor Degeneration von Gewebe zu schützen, etwa Nerven, Knochen/Gelenke und Blutgefäße.

Verletzungen durch Überbeanspruchung und chronischen Erkrankungen:

Der Heilungszyklus von Gewebe besteht aus drei Phasen, nämlich der Entzündungs-, der Vermehrungs- und der Organisationsphase. Chronische Verletzungen oder Entzündungen als Reaktion auf Überbeanspruchung treten auf, wenn das Gewebe den Zyklus nicht vollendet. Das Gewebe bleibt in der Entzündungsphase und kommt nicht in die Vermehrungsphase (der tatsächlichen Heilung von Zellen und Gewebe) oder die Organisationsphase.

Damit diese „Verletzungen“ heilen, braucht der Körper eine Stimulation des Zellcodes (DNA und RNA), z.B. dass die Entzündungsphase beendet und zur echten Heilungsphase gewechselt werden soll. Wenn der Entzündungsprozess zur Bildung von Narbengewebe führt, führt das zu Verwachsungen, die das normale „Gleiten“ der Muskeln und Gewebefasern hemmen. Die Folge sind Irritationen und weitere Entzündungen, und so kann ein Teufelskreis entstehen.

Photizo® Vetcare hilft bei Muskelkrämpfen und schmerzhaften Triggerpunkten. Es reduziert die Entzündungsprozesse und lindert Schmerzen, wobei es den Kreislauf durchbricht und dem Gewebe die Möglichkeit gibt den Heilungsprozess - wenn möglich - zu starten, oder im Falle chronischer Erkrankungen, schmerzfreie Perioden zu erreichen.

Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Behandlung mit Photizo® Vetcare Verwachsungen nicht rückgängig macht. Aber es kontrolliert die Entzündung, lindert die Beschwerden und reduziert das Risiko, dass sich weiteres Narbengewebe bildet. Beginnen Sie immer gleich mit der Behandlung, wenn das Problem beginnt, weil dadurch chronische Probleme vermieden werden können.

Chronische Schmerzen: Alle Arten an Arthritis und irreversiblen Gelenkschäden, chronischen Muskelkrämpfen, Trigger-/Akupunkturpunkten

- Photizo® Vetcare stimuliert die Ausschüttung von Endorphin und Serotonin. Das sind die körpereigenen „Medikamente“ gegen Schmerzen und für Entspannung (dieser Effekt ist besonders ausgeprägt bei Katzen).
- Photizo® lindert wirksam Entzündungsprozesse, die durch Schädigung oder Überbelastung entstanden sind. Die Behandlung reduziert Muskelkrämpfe und befreit von Triggerpunkten. Es hilft auch dabei, dass Schwellungen zurückgehen, indem es die Erweiterung von Blut- und Lymphgefäßen fördert, so dass Abfallstoffe aus dem betroffenen Bereich besser abtransportiert werden können. Das reduziert den Druck und die Reizung an den Nervenenden, die zu zusätzlichen Schmerzen führen können. Die bessere Durchblutung des Bereiches gewährleistet, dass das Gewebe mehr Nährstoffe und mehr Sauerstoff aufnehmen kann.
- Die Behandlung senkt die Geschwindigkeit der Leitung und die Reizung durch die Schmerzen an den leitenden Nerven.
- Photizo® reduziert Muskelkrämpfe und hilft bei engen Triggerpunkten.
- Die Behandlung fördert das optimale Arbeiten der Zellen (Haut, Knochen, Nerven, Kapseln, Knorpel und Muskeln) um gesundes Gewebe zu erhalten. Das kann dabei helfen, vor Degeneration von Gewebe zu schützen, etwa Nerven, Knochen/Gelenke und Blutgefäße.
- Die Behandlung an Akupunkturpunkten hat hervorragende Ergebnisse.

Erkrankungen und Behandlung:

BITTE BERÜCKSICHTIGEN SIE FOLGENDES:

Für eine wirksame Behandlung brauchen kleine Tiere und Nutztiere unterschiedliche Dosierungen. Photizo® Vetcare wurde so programmiert, dass es eine wirksame einmalige Dosis gibt. Für die verschiedenen Arten von Tieren, berücksichtigen Sie bitte die nachfolgenden Vorgaben für ihre Behandlung:

Zusammengefasste Erkrankungen	Haustiere	Größere Nutztiere und Pferde
<i>Hautprobleme</i>	<i>einfache Dosis</i>	<i>einfache Dosis</i>
<i>Oberflächliche Erkrankungen von Muskeln/Sehnen/Bändern</i>	<i>einfache Dosis</i>	<i>doppelte Dosis</i>
<i>Tiefer liegende Erkrankungen von Muskeln/Sehnen/Bändern</i>	<i>einfache Dosis</i>	<i>dreifache Dosis</i>
<i>Gelenk- und Knochenprobleme</i>	<i>einfache Dosis</i>	<i>doppelte Dosis</i>

Probleme mit Weichteilen: Muskeln, Sehnen & Bändern:

Akute Verletzungen:

Beginnen Sie die Behandlung, indem Sie den verletzten und schmerzenden Bereich einmal täglich über zehn (10) Tage hinweg behandeln. Wenn Die Krankheit danach noch anhält oder das Tier immer noch zeigt, dass es Beschwerden hat, setzten Sie die Behandlung zwei (2) bis drei (3) mal pro Woche fort. Bei akuten Schmerzen können Sie über zwei (2) bis drei (3) Tage hinweg auch zweimal (2) täglich behandeln, aber dann sollten Sie wieder auf einmal (1) täglich, zehn Tage lang, reduzieren.

Wenn Muskelkrämpfe oder schmerzhafte Triggerpunkte gerade stattfinden, schließen Sie diese Bereiche in die Behandlung mit ein. Die Behandlung von Akupunkturpunkten hat ebenfalls gute Ergebnisse.

Chronische Probleme und Probleme durch Überbeanspruchung:

Behandeln Sie die betroffenen Bereiche einmal (1) täglich über fünf (5) bis sieben (7) Tage hinweg; reduzieren Sie die Behandlung danach auf zwei (2) bis (3) mal pro Woche für bis zu drei (3) Wochen. Wenn Sie danach immer noch Beschwerden bemerken, reduzieren Sie die Behandlung auf einmal (1) wöchentlich. Wenn das Problem weiterhin bestehen bleibt, überprüfen Sie bitte die Erkrankung oder setzen Sie sich mit einem Tierarzt in Verbindung.

Mastitis:

Nutztiere: Behandeln Sie direkt über dem betroffenen Euter, geben Sie eine doppelte Dosis zwei (2) bis drei (3) mal pro Woche, bis die Erkrankung abgeklungen ist. Setzen Sie dabei die Behandlung mit topischen oder systemischen Medikamenten fort. Haustiere: Behandeln Sie den betroffenen Bereich einmal am Tag bis die Erkrankung abgeklungen ist.

Wunden, Fleischwunden, Wunden, Fleischwunden, Nekrose nach Hyalomma-Zeckenbissen, Flecken, Abszesse, wund gescheuerte Stellen, Habronema, Proud Flesh, akrale Leckdermatitis, Prellungen, Otitis Externa, Pustelausschlag, Pododermatitis, Hautallergien, Ekzeme, etc.

- Akute Verletzungen: Beginnen Sie mit der Behandlung so bald wie möglich, um die Zellreparatur zu fördern. Behandeln Sie alle akuten Hautkrankheiten täglich, bis sie verheilt sind.
- Chronische Hautprobleme: Behandeln Sie die Stellen täglich einmal (1) für fünf (5) bis sieben (7) Tage, anschließend behandeln Sie zweimal (2) pro Woche. Sie können die Behandlung auf einmal (1) pro Woche reduzieren, wenn sich die Erkrankung stabilisiert hat, um die gesunde Haut aufrecht zu erhalten.
- Entzündungszustände wie z.B. Abszesse, Hot Spots, Habronema, etc.: Die Behandlung mit Photizo® Vetcare ist kein Ersatz für Antibiotika oder andere verschreibungspflichtige Medikamente,

aber es hilft während des Heilungsprozesses, indem es das Immunsystem stimuliert, die Heilung beschleunigt und dazu beiträgt, dass die Medikamente zu der betroffenen Stelle gelangen. Eine chirurgische Drainage des Abszesses kann in einigen Fällen notwendig sein, bevor die Behandlung wirksam wird.

Gelenkprobleme, Prellungen, Stressfrakturen und Knorpelverletzungen:

- Akute Verletzungen: Beginnen Sie so bald wie möglich mit der Behandlung. Decken Sie die komplette Gelenklinie oder den verletzten Bereich ab. Führen Sie die Behandlung täglich zehn (10) Tage lang durch, dann reduzieren Sie die Behandlung auf dreimal (3) pro Woche, bis die Verletzung geheilt ist.
- Chronische Gelenkschmerzen wie Arthritis, Hüftgelenkdisplasie: Führen Sie die Behandlung täglich fünf (5) bis sieben (7) Tage lang durch um den Entzündungsprozess zu reduzieren und die Schmerzen zu kontrollieren. Dann reduzieren Sie die Behandlung auf zwei (2) bis drei (3) mal pro Woche. Reduzieren Sie die Häufigkeit der Behandlung auf einmal (1) pro Woche, wenn sich der Zustand stabilisiert. Decken Sie die komplette Gelenklinie ab, Vorderseite, Seiten und Rückseite.

Prellungen des tiefen Gewebes und Hämatome:

Beginnen Sie so bald wie möglich mit der Behandlung, nachdem die Verletzung passiert ist, und decken Sie den kompletten betroffenen Bereich ab. In Fällen, bei denen ein Ödem vorhanden ist, behandeln Sie auch die proximalen Lymphknoten um sicher zu gehen dass die Abfallstoffe schneller abgeleitet werden sowie die Eiweißverbindungen. Behandeln Sie so lange, bis die Verletzung geheilt ist.

Post-operative Behandlungen:

Beginnen Sie die Behandlung direkt nach der Operationen, insbesondere bei Pferden. Die Behandlung hilft dabei, die Entstehung von Proud Flesh zu vermeiden. Behandeln Sie täglich für fünf (5) bis zehn (10) Tage. Zu den Vorzügen der Behandlung gehören die Linderung der Schmerzen, eine schnellere Heilung, weniger Narbengewebe/Bildung von Proud Flesh, eine Stimulation des Immunsystems und einen Rückgang der Schwellungen.

Sonstige: Es wird empfohlen, dass die Behandlung dieser Erkrankungen von einem ausgebildeten Tierarzt durchgeführt wird!

Augenverletzungen, Hornhautulkus, virale, in Verbindung mit Herpes auftretende Erkrankungen, Sinusitis, retro-obikulares Trauma. Augenverletzungen: Obwohl das Licht von Photizo Vet-care hell ist, kann es die Augen nicht schädigen, und die Behandlung von Augenverletzungen fördert die Heilung. Wenn sich das Tier vor dem Licht fürchtet, können Sie die Behandlung seitlich am Kopf durchführen, weil das Licht durch den Knochen dringt. Behandeln Sie einmal (1) täglich für fünf (5) bis sieben (7) Tage.

Entzündliche Erkrankungen: z.B. virale, durch Herpes hervorgerufene Erkrankungen, bakterielle oder fungale Infektionen:

Bitte unterbrechen Sie nicht die Einnahme von Medikamenten. Behandeln Sie drei (3) bis fünf (5) mal pro Woche über vier (4) Wochen hinweg oder bis die Erkrankung geheilt ist. Photizo® Vetcare stimuliert das lokale und das systemische Immunsystem und kann den Körper dazu veranlassen Antikörper gegen den Krankheitserreger zu entwickeln.

Der Gebrauch des Photizo® Vetcare

- Photizo® Vetcare arbeitet Batterie betrieben oder mit Strom.
- Um das Gerät anzuschalten, drücken Sie auf die POWER-Taste. Die Kontrollanzeige beginnt zu leuchten und das Gerät piept zweimal.
- Wenn der Behandlungszyklus beendet ist, piept das Gerät zweimal und schaltet sich automatisch aus.
- Die Linse des Photizo Geräts wärmt sich bei wiederholten Anwendungszyklen durch die Energie des ausgestrahlten Lichts auf. Wenn die Linse so heiß wird, dass man sie nicht mehr anfassen kann, unterbrechen Sie die Behandlung für ein paar Minuten, damit sich die Linse abkühlen kann, bevor Sie mit der Behandlung fortfahren.
- Um das Gerät während des Behandlungszyklus abzuschalten, drücken Sie den POWER-Schalter und halten ihn für eine Sekunde gedrückt.
- Wenn Sie das Gerät mit Batterien betreiben, ist das Licht der Kontrollanzeige grün, orange oder rot. Grün steht für eine volle Batterie, rot für eine leere Batterie. Wenn die Batterie leer ist, schaltet sich das Gerät automatisch ab und piept zweimal. Das Gerät lässt sich nicht mehr anschalten, bis es an das Stromnetz angeschlossen wird.
- Wenn Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen, piept es einmal, und nach einer kurzen Pause beginnt die Kontrollleuchte zu flackern. Wenn die Batterie leer ist, leuchtet es in rot, dann orange und dann grün, während die Batterie lädt. Wenn die Batterie voll aufgeladen ist, flackert die Kontrollleuchte nicht mehr sondern leuchtet permanent grün.

Fehlerbehebung:

<i>Problem</i>	<i>Lösung</i>
<i>Das Gerät lässt sich nicht anschalten</i>	Die Batterie muss aufgeladen werden
<i>Das Gerät lädt nicht auf</i>	Ist das Ladegerät mit dem Gerät verbunden/in eine Steckdose eingesteckt und angeschaltet? Sind alle Verbindungen sicher?
<i>Die zwei großen LEDs scheinen nicht angeschaltet zu sein/nicht zu funktionieren</i>	Diese LED Wellenlinien liegen innerhalb des sichtbaren Bereichs und können deshalb nicht mit dem bloßem Auge gesehen werden. Um zu sehen, ob diese LEDs funktionieren, schauen Sie sie mit der Kamera Ihres Handys an.

Technische Daten:

Das Gerät verfügt über ein Licht-ausgebendes Spektrum mit hoch wirksamen Rot- und Infrarotlicht ausgebenden Dioden.

Ausgangsleistung: 1300mW

Abdeckung:4.7cm²

Wellenlängen:633nm Rot, 850nm Infrarot

Stromnetz:100 -240VAC

Batteriespannung: 7,2 V DC

Batterieaufladegerät: 12V, 1A

Gewicht: 280 Gramm

Ladezeit: 3-4 Stunden

Standardzubehör

- Netzteil
- Anleitung
- Aufbewahrungsbeute

Photizo® Vetcare wurde von einem Team aus Physiotherapeuten, Biologen, Tierärzten und Ingenieuren entwickelt und ein vereinfachtes, Nutzer freundliches System anbieten zu können. Wir sind stolz, dass dieses Produkt höchsten Qualitätsansprüchen entspricht und nutzen nur qualitativ hochwertige Bestandteile. Bitte beachten Sie, dass PHOTIZO VETCARE KEIN ERSATZ FÜR EINEN SOLIDEN MEDIZINISCHEN RAT ODER EINE UNTERSUCHUNG IST, SONDERN EIN ZUSÄTZLICHES, BEGLEITENDES BEHANDLUNGSGERÄT. SIE KÖNNEN NICHT DAVON AUSGEHEN, DASS DIE LICHTTHERAPIE FÜR ALLE ERKRANKUNGEN GEEIGNET IST. PHOTIZO® VETCARE IST KEIN INSTRUMENT ZUR DIAGNOSE UND IST NICHT DAFÜR GEDACHT, EINE MEDIZINISCHE BEHANDLUNG ZU ERSETZEN.

Kontakt

Photon Therapy Systems (Pty) Ltd
Tel: 0861 640 640
Internationales Tel: +27 10 590 7113
E-mail: info@photizo.net
Webseite: www.photizo.net

WARNUNG

VERWENDEN SIE NUR DAS PHOTIZO® LADEGERÄT, DAS MIT DEM GERÄT GELIEFERT WIRD, UM DIE BATTERIEN AUFZULADEN. ALLE ANDEREN LADEGERÄTE KÖNNEN DIE BATTERIEN ODER DAS PHOTIZO VETCARE BESCHÄDIGEN.

GARANTIE

Dieses Produkt verfügt über ein Jahr Garantie ab Kaufdatum, bei Vorlage des Original-Kaufbelegs. KEINE Garantie gilt bei mutwilligen Beschädigungen, wenn die Batterie undicht ist, wenn das Gerät aus Versehen herunter fällt, bei Wasserschäden oder bei Beschädigungen durch organische Lösungsmittel. Die Batterien sind ausdrücklich von der Garantie ausgeschlossen. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die technischen Daten des Geräts von denen in dieser Beschreibung abweichen können.

Wenn Sie Hilfe benötigen oder Ihr Produkt nicht funktioniert, nehmen Sie bitte Kontakt auf zu einem Vertriebspartner in Ihrer Nähe AUF oder schicken Sie eine E-Mail an info@photizo.net.

- NOTIZEN -

[illegible]

- NOTIZEN -

This image shows a full page of a document template designed for handwritten notes or essays. It features approximately 30 evenly spaced horizontal dotted lines across the entire width of the page, providing a guide for letter height and placement. The background is plain white, and there are no margins, headers, or footers visible.



Photon Therapy Systems (Pty) Ltd

Tel: 0861 640 640

Internationales Tel: +27 10 590 7113

E-mail: info@photizo.net

Webseite: www.photizo.net